



Testbericht:

Tim und Ben – Probephase Frühjahr 2026

Insgesamt wurden 10 Testzentren ausgewählt, die BEN und TIM für eine 2-monatige Testphase erhielten. Es wurden in etwa 20-40 Intubationen pro Zentrum dokumentiert. Insgesamt wurden 127 Rückmeldungen von 66 Trainierenden erfasst (61 Tim, 66 Ben) und wie folgend bewertet:

Frage	Anzahl Rückmeldungen	Mediane Bewertung	Interquartilen Range (IQR)
Wie zufrieden waren Sie mit dem Produkt? (Gesamtzufriedenheit)	125	9 / 9	8 – 9
Wie realistisch finden Sie das Kehlkopfdesign?	124	9 / 9	8 – 9
Wie realistisch finden Sie den Mund-Rachenraum?	124	9 / 9	8 – 9
Wie real empfinden Sie die Intubation?	117	8 / 9	7 – 9
Wie real empfinden Sie die Masken-Beutel-Beatmung?	60	8 / 9	5 – 9

Einzelbewertungen für Tim (300g):

Frage	Anzahl Rückmeldungen	Mediane Bewertung	Interquartilen Range (IQR)
Wie zufrieden waren Sie mit dem Produkt? (Gesamtzufriedenheit)	59	9 / 9	8 – 9
Wie realistisch finden Sie das Kehlkopfdesign?	61	9 / 9	8 – 9
Wie realistisch finden Sie den Mund-Rachenraum?	61	9 / 9	8 – 9
Wie real empfinden Sie die Intubation?	56	9 / 9	7 – 9
Wie real empfinden Sie die Masken-Beutel-Beatmung?	24	8 / 9	6 – 9

Einzelbewertungen für Ben (500g):

Frage	Anzahl Rückmeldungen	Mediane Bewertung	Interquartilen Range (IQR)
Wie zufrieden waren Sie mit dem Produkt? (Gesamtzufriedenheit)	66	9 / 9	8 – 9
Wie realistisch finden Sie das Kehlkopfdesign?	63	9 / 9	8 – 9
Wie realistisch finden Sie den Mund-Rachenraum?	63	9 / 9	8 – 9
Wie real empfinden Sie die Intubation?	61	8 / 9	7 – 9
Wie real empfinden Sie die Masken-Beutel-Beatmung?	36	8 / 9	5 – 9

Aus den Rückmeldungen resultierende Veränderungen:

1. Material der Außenhaut wurde weicher gestaltet.
2. Nasengänge überarbeitet, um bessere Tubuspassage zu gewährleisten.
3. Die Halterung der Testlunge im Thoraxbereich wurde verbessert.
4. Der Übertritt des Tubus in die Testlunge wurde vereinfacht.